

Ein Herzstillstand kann jeden treffen – meistens unerwartet

Mit dem LifePad® kann sofort geholfen werden

Das menschliche Gehirn kann bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand höchstens fünf Minuten ohne Sauerstoff überleben, wobei mit jeder Minute die Wahrscheinlichkeit für schwerwiegende Folgen steigt.

Nicht einmal bei der Hälfte der Herzstillstände in Deutschland führen Ersthelfer die lebensrettenden Handgriffe aus. Wenn mehr Menschen unverzüglich handeln würden, könnten sich die Überlebenschancen der Betroffenen um ein Vielfaches erhöhen.

Vorteile des LifePads®:



Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reanimation

Einfache Anwendung, keine Vorkenntnisse notwendig

Visuelles und akustisches Feedbacksystem

Für optimale Kompressionstiefe und Druckfrequenz

Kompakte Größe

Im DIN A5 Format (21x16 cm) in jeder Tasche gut verstaubar

Flexibles Material

Passt sich der Körperform an

Einfache Positionierung

Anleitung und Markierung direkt auf dem Pad

LifePad®

Dein Helfer im Notfall



In Kooperation mit der Björn Steiger Stiftung

„In einem Notfall sind oft Minuten oder sogar Sekunden entscheidend. Allein in Deutschland könnten **jährlich tausende Leben gerettet werden**, wenn mehr Menschen im Notfall unverzüglich eine Herzdruckmassage ausführen würden.“

Das „LifePad“ ist eine sinnvolle Unterstützung bei Wiederbelebnungsmaßnahmen und die Bedienung ist denkbar einfach.“



Björn Steiger Stiftung

WIR HELFEN LEBEN RETTEN

Weitere Informationen:

www.beurer.com/lifepad

Beurer GmbH, Postfach 1427, 89004 Ulm, Söflinger Straße 218, 89077 Ulm, Germany
Tel. +49 731/39 89-0, Fax. +49 731/39 89-139, vertrieb@beurer.de
www.beurer.com



LifePad®
Erste Hilfe –
sicher und
schnell



759.529.1021 Irrtum und Änderungen vorbehalten.

RH 112 - LifePad® by beurer
Reanimationshilfe



Anwendung

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reanimation



1.

Bewusstsein und Atmung überprüfen



2.

Notruf absetzen



3.


Oberkörper frei machen



4.

LifePad® auflegen

Batterie-streifen zum Einschalten ziehen

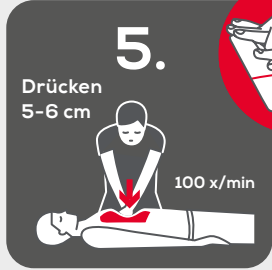

5.

Drücken 5-6 cm

100 x/min

Kompression durchführen



6.

Entlasten 5-6 cm

Brustkorb wieder entlasten



Schritt 5 und 6 im Rhythmus des Signaltons wiederholen (Ton = Drücken), um eine Frequenz von 100 Kompressionen pro Minute zu gewährleisten.

Die Herzdruckmassage wird durchgeführt, bis wieder deutliche Lebenszeichen wahrnehmbar sind oder der Notarzt übernimmt.



Wussten Sie, dass ein Herzstillstand häufig zu Hause oder auf der Arbeit passiert?


Was macht das LifePad® by beurer aus?

Sollte der Ernstfall eintreten, sind viele Ersthelfer zunächst überfordert. Das LifePad® leitet Sie bei der Reanimation an und hilft Ihnen, die richtigen Schritte sicher durchzuführen.

Visuelles und akustisches Feedbacksystem

Die Schritt-für-Schritt-Anleitung hilft Ihnen, einen kühlen Kopf zu bewahren. Durch die farbigen LED's erhalten Sie visuelles Feedback für den optimalen Kompressionsdruck.

Ein akustisches Signal gibt Ihnen die optimale Kompressionsfrequenz von 100 Schlägen pro Minute vor.

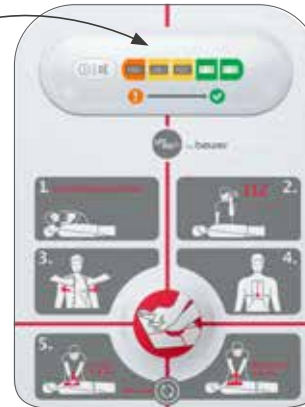

Zögern Sie nicht, sofort zu handeln!



Die häufigsten Anwendungsfälle



Auf der Arbeit



In der Freizeit

Einfache Anwendung

Durch das flexible Material passt sich das LifePad® jeder Körperform an und kann bei Personen ab 12 Jahren angewendet werden. Die Auflagefläche zeigt die genaue Positionierung der Hände für die Reanimation.



Im Straßenverkehr

Das Gerät kann auch in Kombination mit einem Defibrillator verwendet werden (Signalton dafür abschaltbar).



Praktisch: das LifePad® by beurer ist immer dabei.

